

# Star Brace®

## Dynamic Fix

Funktionelle Rücken-Orthese

Hilfsmittelnummer 23.14.04.2007 Short

Hilfsmittelnummer 23.14.04.2008 Long

### INDIKATIONEN:

- ◆ Nach stabilisierender OP (Spondylodese)
- ◆ Nach lumbaler Bandscheiben-OP
- ◆ Degenerative Instabilität
- ◆ Spondylolisthese, Spondylolyse
- ◆ Facettensyndrom
- ◆ Lumbale Spinalkanalstenose
- ◆ Symptomatische Stenosen der lumbalen Foramina intervertebrale
- ◆ Wirbelfrakturen der unteren LWS
- ◆ Tumore (Metastasen), entzündliche Prozesse

### MERKMALE

- ◆ Komfortables, kraftsparendes Anlegen für den Patienten durch die LPT-Zuggurte.
- ◆ Hoher Tragekomfort.
- ◆ Die während der Therapie eingesetzten Module stehen auch nach dem Abrüsten der Orthese zur Verfügung, sodass ein erneutes Aufrüsten des Systems mit PE-Rückenstütze (Polyethylen-Kunststoff) oder Halbschale indikationsbedingt möglich ist


### WIRKUNGSWEISE

Der modulare Aufbau erlaubt eine gesteuerte Therapie gemäß einem individuell adaptierbaren 3-stufigen Behandlungsschema. Beim Abrüsten auch als Semi-Rigid-Bandage einsetzbar.

### MULTIFUNKTIONALITÄT

Der modulare Aufbau ermöglicht ein 3-stufiges Behandlungsschema.

- ◆ Stufe 1 (Stabilisierungsphase): Zur effektiven postoperativen oder initial konservativen Sicherung der Segmente SWK 1 bis LWK 4 ("Short") bzw. SWK 1 bis LWK 3 ("Long") wird die Orthese zusammen mit Schale verwendet.
- ◆ Stufe 2 (Mobilisierungsphase): Bei beginnender Mobilisierung mit fortschreitender Rekonvaleszenz wird die Schale entfernt und das Textilelement im zu versorgenden lumbosakralen Bereich durch die PE-Rückenstütze verstärkt.
- ◆ Stufe 3 (Aktivitätsphase): Mit zunehmender Mobilität der Patienten werden die PE-Rückenstütze und Bauchplatte entfernt und dann als Semi-Rigid-Bandage getragen

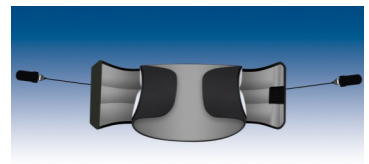

# liberté

Perfect Assistance for Patient's Care

Liberté-Martin

Bahnhofstr. 93

D 95460 Bad Berneck

phone: +49 (0)9273 / 8474

fax: +49 (0)9273 / 8542

www.liberte-germany.de

# liberté®

Perfect Assistance for Patient's Care

Liberté-Martin

Bahnhofstr. 93

D 95460 Bad Berneck

phone: +49 (0)9273 / 8474

fax: +49 (0)9273 / 8542

www.liberte-germany.de


info@liberte-germany.de

## Bestellfax

**fax +49(0)9273/8542**

Star Brace

Dynamic Fix

Größe	S	M	L	XL
Umfang cm 	75 - 85	85 - 95	95 - 110	110 - 125
Short Pos.Nr. 23.14.04.2007 Höhe front 18cm Höhe back 30cm				
Short Pos.Nr. 23.14.04.2008 Höhe front 23cm Höhe back 38cm				

Firma.....Kunden Nr.....

Anschrift.....Datum.....

.....Unterschrift.....

Ansprechpartner..... Tel:.....

Fax:.....